

The logo consists of the letters '3M' in a bold, sans-serif font. The '3' is black and the 'M' is gold. To the left of the logo is a vertical blue gradient bar.

- Completamente indolore
- Funziona su ogni fototipo
- Adatto alla pelle abbronzata
- Maggiori prestazioni



TAUROS EVO

Una svolta nell'epilazione laser, combina quattro lunghezze d'onda per risultati senza pari

bio-med.tech



Epilazione più rapida, efficiente e conveniente

TAUROS^{EVO}

Tauros Evo rappresenta una tecnologia rivoluzionaria per l'epilazione, combina la massima funzionalità con un comfort senza pari: una svolta nell'epilazione laser che unisce tecnologie sinergiche a risultati superiori. Questa apparecchiatura combina le 4 lunghezze d'onda laser più efficaci al mondo in un unico applicatore, mirando contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero. La combinazione di livelli di assorbimento e penetrazione di diverse lunghezze d'onda, insieme a una copertura estesa del trattamento, un maggiore comfort e bassi requisiti di manutenzione, rendono Tauros Evo il trattamento di epilazione più sicuro ed efficiente oggi disponibile.

COME FUNZIONA

L'innovativo manipolo di questa tecnologia è una risorsa preziosa per chiunque. Con la sua superficie di 4 cm², una performance del 40% più veloce e l'integrazione di **4 lunghezze d'onda, 755-808-940-1064 nm**, riduce significativamente i tempi di trattamento e rende il processo più facile e più sicuro per i pazienti.

1064 nm: il basso assorbimento della melanina e la penetrazione più profonda del follicolo pilifero, consentono al diodo di trattare le pelli più scure e di raggiungere il follicolo in modo sicuro ed efficace.

808 nm: Il moderato assorbimento della melanina consentono a questa lunghezza d'onda una penetrazione profonda che raggiunge il bulbo direttamente e lo rende ideale per tutti i tipi di pelle.

755 nm: grazie ad un maggior assorbimento della melanina colpisce tutti i tipi di pelo, specialmente quelli chiari e sottili. L'obiettivo di questa lunghezza è il bulge del follicolo.


940 nm: colpisce il pelo in prossimità delle cellule staminali, le quali vengono danneggiate per propagazione del calore e non per diretto assorbimento. Inoltre stimola la vasodilatazione e la stimolazione di collagene ed elastina, rendendola adatta anche a trattamenti di fotoringiovanimento.

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

Tauros Evo è in grado di lavorare contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero, aumentando l'efficienza del trattamento. L'assorbimento combinato con raffreddamento continuo, il comfort e la bassa manutenzione, consentono il trattamento di una vasta gamma di tipologie e colori di pelo, (anche quelli chiari e particolarmente sottili).



THE POWER OF THREE
NEW - TRE TECNOLOGIE COMBinate PER LA
RIMOZIONE LASER DEI PELI
IN UN SOLO MANIPOLO

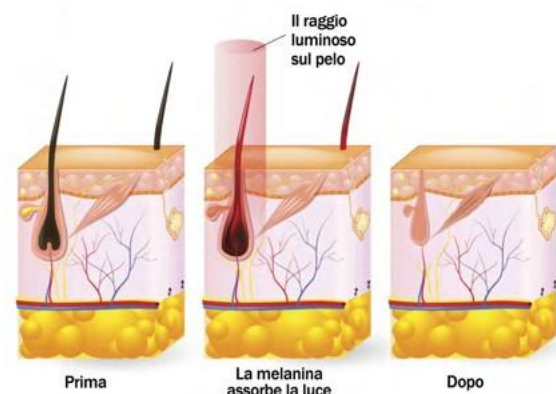

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TAUROS EVO
Energia	10-150j/cm ² (regolabile)
Lunghezza d'onda	755-808-940-1064nm
Impulso	40-800 ms (regolabile)
Potenza manipolo	1200 w
Alimentazione	AC 220V/110V

